

Thermometerspitze

Grünes Licht  
Rotes und rot  
blinkendes Licht

BIOSELF

FERTILE  
36.2°C

Anzeige

Schwarzer Knopf  
zum Zugriff  
auf die Hilfsfunktionen

Roter Knopf  
(Menstruation)

Lautsprecher zur  
telefonischen Übertragung  
(auf der Rückseite)

Batteriefach  
(auf der Rückseite)

**BIOSELF**

**BIOSELF**

Fruchtbarkeitsanzeiger

### VORSICHT

- BIOSELF® ist für Frauen mit Menstruationszyklen - vorzugsweise mit regelmässigen Zyklen - von 18 bis 39 Tagen bestimmt.
- BIOSELF® darf nicht angewendet werden, wenn Sie stillen, unter Hormonbehandlung stehen (z.B. Antibabypille) oder wenn Sie Symptome für das Einsetzen der Wechseljahre festgestellt haben.
- BIOSELF® bietet keinen Schutz gegen Krankheiten, welche durch Geschlechtskontakt übertragen werden (AIDS, usw.).

[www.bioself.com](http://www.bioself.com)  
[admin@bioself.com](mailto:admin@bioself.com)

CE 0459

Made in Switzerland

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

**BIOSELF® SA**

Postfach

CH-1226 THONEX-GENEVE

Tel. (41) 22 349 68 13 Fax (41) 22 348 12 11

OTI • Rev. 12/2002

Wenn das

Ihre Frage ist...

Sein  
oder  
nicht  
Sein



## ...BIOSELF® hat an Sie gedacht und bietet Ihnen eine natürliche Alternative bei der Familienplanung, sicher und ohne Nebenwirkungen

### BIOSELF®

BIOSELF® ist ein elektronischer Fruchtbarkeitsindikator: einfach, schnell und präzise. Er bietet den Frauen Fortschritt in der Familienplanung, indem er sowohl die maximale Fruchtbarkeitsphase anzeigt (das heißt, die für die Empfängnis günstigsten Tage) als auch die unfruchtbare Phase, während derer keine Empfängnis möglich ist (und somit keine Verhütungsmittel angewendet werden müssen).

### Bekannte Prinzipien

Der sehr leistungsfähige Mikrocomputer im BIOSELF® verbindet die Kalendermethode mit der Basaltemperaturmethode. Dank der neuesten Fortschritte der Mikroelektronik wird mit BIOSELF® die Verwendung dieser beiden natürlichen Methoden ebenso einfach und präzise wie zuverlässig.

BIOSELF® registriert und analysiert Ihre Basaltemperaturen und Ihre Zykluslängen und kann Ihnen auf diese Weise täglich Ihren Fruchtbarkeitszustand anzeigen. Er speichert alle Daten Ihrer letzten 12 Zyklen, und seine Berechnungen werden bei längerer Anwendung immer personenspezifischer.

BIOSELF® bietet Ihnen ebenfalls die Möglichkeit, den genauen Ablauf Ihrer Zyklen in Form von Kurven ausdrucken zu lassen.

### Einfache Anwendung

Die Anwendung des BIOSELF® ist äußerst einfach. Jeden Morgen beim Aufwachen wird etwa zur gleichen Zeit innerhalb kürzester Zeit Ihre Basaltemperatur gemessen. Damit Sie es nicht vergessen, erinnert Sie BIOSELF® mit einem Signalton diskret daran.



Einmal im Monat, am ersten Tag Ihrer Menstruation, drücken Sie auf den roten Knopf, um den Beginn eines neuen Zyklus in den Speicher des BIOSELF® einzugeben.




Nach automatischer Analyse und Verarbeitung dieser Informationen zeigt Ihnen BIOSELF® mit 3 Lichtsignalen täglich Ihren Fruchtbarkeitszustand an:

	Grünes Licht = <b>Unfruchtbar</b>
	Rotes Licht = <b>Wenig fruchtbar</b>
	Rot blinkendes Licht = <b>Sehr fruchtbar</b>

### Ausdrucken Ihrer Fruchtbarkeitskurve

Per Telefon können Sie alle Ihre Monatszyklen in Form einer Kurve ausdrucken lassen.

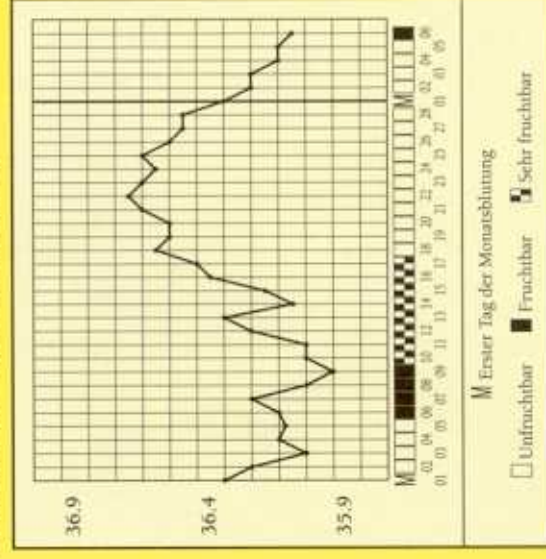

Die darauf erscheinenden Informationen können für Ihren Arzt sehr hilfreich sein, insbesondere bei der Behandlung von Fruchtbarkeitsproblemen oder zur Berechnung des voraussichtlichen Geburtsdatums nach der Befruchtung.