

Pointe thermique



Haut-parleur de transmission (au dos)

Compartment pour les piles (au dos)

BIOSELF

BIOSELF

Indicateur de fertilité

ATTENTION

- BIOSELF® s'adresse aux femmes qui ont des cycles menstruels - réguliers de préférence - d'une durée comprise entre 18 et 39 jours.
- BIOSELF® ne doit pas être utilisé pendant l'allaitement ou lors de la prise de traitements hormonaux (par ex. pilule) ou si vous avez connaissance de symptômes ménopausaux.
- BIOSELF® n'offre aucune protection contre les maladies sexuellement transmissibles (HIV, etc.).

CE 0459

Site internet : www.bioself.com
Email : admin@bioself.com

Made in Switzerland

Pour plus d'informations, veuillez contacter:

BIOSELF® SA

Case postale

CH-1226 THONEX-GENEVE

Tél. (41) 22 349 68 13 Fax (41) 22 348 12 11

CCV - Rev 02-2005

Être ou ne pas Être

Si telle
est votre question...

...**BIOSELF®** a pensé à vous
en apportant une *alternative naturelle*
en matière de *planning familial*,
sûre et sans effet secondaire

BIOSELF®

BIOSELF® est un indicateur de fertilité électronique simple, rapide et précis. Il offre un progrès en matière de *planning naturel* familial en déterminant à la fois la période de fertilité maximale (c'est-à-dire les jours les plus favorables pour concevoir un enfant) et la période infertile pendant laquelle aucune fécondation n'est possible (celle où il n'est pas nécessaire d'avoir recours à un contraceptif "barrière").

Principes connus

Le micro-ordinateur très performant de **BIOSELF®** combine la méthode du calendrier et celle de la température basale. Grâce aux plus récents progrès de la microélectronique, **BIOSELF®** rend la pratique de ces deux méthodes naturelles aussi simple et précise que fiable.

BIOSELF® enregistre et analyse vos températures basales et vos longueurs de cycles pour vous informer quotidiennement sur votre état de fertilité. Il mémorise toutes les données se rapportant à vos 12 derniers cycles et se personnalise au fur et à mesure que vous l'utilisez.

BIOSELF® offre également la possibilité de faire imprimer le déroulement précis de vos cycles sous forme de courbe graphique.

Utilisation facile

L'utilisation de **BIOSELF®** est très simple. Chaque matin au réveil, approximativement à la même heure, votre température basale est mesurée en quelques instants. Afin de ne pas l'oublier, **BIOSELF®** vous le rappelle grâce à un discret signal sonore.



Une fois par mois, à savoir le premier jour de vos règles, vous pressez le bouton rouge pour inscrire le début de votre nouveau cycle dans la mémoire de **BIOSELF®**.




Après analyse et traitement automatique de ces informations, **BIOSELF®** indique au moyen de 3 signaux lumineux, votre état quotidien de fertilité:

	Voyant "Vert" = Infertile
	Voyant "Rouge" = Peu fertile
	Voyant "Rouge Clignotant" = Très fertile

Impression de votre courbe graphique

Vous pouvez faire imprimer tout l'historique de vos cycles menstruels sous forme de courbe graphique, par simple appel téléphonique.

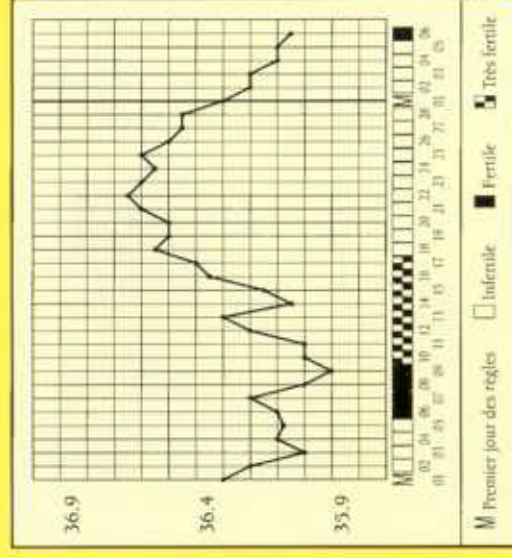

Les informations qui en ressortent peuvent être très utiles à votre médecin particulièrement en cas de problèmes de fertilité, ou par exemple pour connaître la date prévisible du terme après fécondation.