

Sonda térmica



Indicador luminoso rojo o rojo intermitente

Indicador luminoso verde

Botón negro para acceder a los menús accesorios

Botón rojo de las reglas

Altavoz para transmisión telefónica (al dorso)

Compartimento para pilas (al dorso)

BIOSELF

BIOSELF

Indicador de fertilidad

Atención

Bioself está destinado a mujeres con ciclos menstruales entre 18 y 39 días.

Bioself no puede ser utilizado durante la lactancia, tratamientos hormonales o si se han detectado síntomas de menopausia.

no
Ser
no
Ser

Fabricado en Suiza

BIOSELF® DISTRIBUTION SA

Case Postale

CH-1226 THONEX-GENEVE

Si ese es su dilema...

...BIOSELF® ha pensado en usted, aportándole una alternativa natural, segura y sin efectos secundarios.

BIOSELF®

BIOSELF® es un indicador de fertilidad simple, rápido y preciso. Se trata de un avance en materia de planificación familiar natural, gracias a la determinación tanto del periodo de fertilidad máxima (es decir, los días más favorables para concebir un hijo) como del periodo infértil durante el cual no es posible la fecundación.

Principios conocidos

El microordenador de alto rendimiento de BIOSELF® combina el método de calendario con el de temperatura basal. Gracias a los más recientes progresos de la microelectrónica, BIOSELF® permite la práctica de estos dos métodos naturales de una manera tan simple y precisa como fiable.

BIOSELF® registra y analiza la temperatura basal y la duración de los ciclos para informarle diariamente de su estado de fecundidad. Asimismo, memoriza todos los datos relacionados con sus 12 últimos ciclos personalizándose progresivamente a medida que lo utiliza.

BIOSELF® ofrece además la posibilidad de imprimir el desarrollo exacto de sus ciclos, en forma de curva gráfica.

Fácil de usar

La utilización de BIOSELF® es muy simple. Cada mañana al despertarse, aproximadamente a la misma hora, podrá medir su temperatura basal rápidamente. Para evitar que lo olvide, BIOSELF® se lo recuerda con una discreta señal sonora.



Una vez al mes, el primer día de la regla, deberá pulsar el botón rojo para inscribir el inicio de un nuevo ciclo en la memoria de BIOSELF®.




Tras análisis y tratamiento automático de los datos aportados, BIOSELF® le indica, mediante 3 señales luminosas, el estado diario de su fertilidad :

	Indicador "Verde" = Infértil
	Indicador "Rojo" = Poco fértil
	Indicador "Rojo intermitente" = Muy fértil

Impresión de su curva gráfica

Puede imprimir el historial de sus ciclos menstruales en forma de curva gráfica, mediante una simple llamada telefónica.

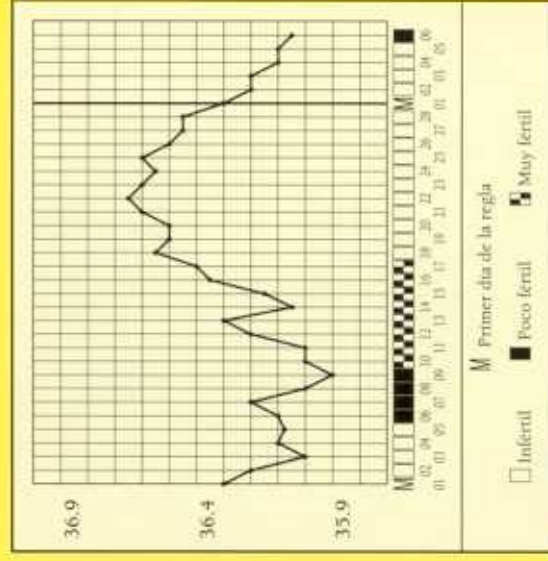

Las informaciones resultantes pueden ser de gran utilidad a su médico, sobre todo en el caso de problemas de fertilidad o, por ejemplo, para conocer la fecha probable de alumbramiento tras la fecundación.